

растворятся. Предупредите пациента, что ему не следует пить и есть в течение 30 минут после окончания лечебного сеанса.

Нанесение в домашних условиях:

III. Нанесение в дневное время после чистки зубов в соответствии с рекомендацией стоматолога.

1. Нанесите достаточное количество GC Tooth Mousse на нижние и верхние зубы. Шарик препарата размером с крупную горошину – это необходимый минимум для каждого зубного ряда. Препарат наносится на поверхность зубов с помощью ватного тампона или сухим чистым пальцем. В труднодоступных местах (между зубами) пользуйтесь специальной щеткой или зубной нитью, смазанной GC Tooth Mousse.

2. Оставьте GC Tooth Mousse на поверхности зубов минимум на 3 минуты.

4. Затем языком распределите остатки GC Tooth Mousse по поверхности зубов и тканям полости рта. Постарайтесь как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплёвывать и не сглатывать слюну. Чем дольше GC Tooth Mousse и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

5. Тщательно сплюньте слюну и остатки препарата и по возможности не споласкивайте рот. Незначительные возможные остатки GC Tooth Mousse быстро растворятся. Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после процедуры нанесения крема.

IV. Нанесение в ночное время после чистки зубов в соответствии с рекомендацией стоматолога.

1. Нанесите достаточное количество GC Tooth Mousse на нижние и верхние зубы. Шарик препарата размером с крупную горошину – это необходимый минимум для каждого зубного ряда. Препарат наносится на поверхность зубов с помощью ватного тампона или сухим чистым пальцем.

В труднодоступных местах (между зубами) пользуйтесь специальной щеткой или зубной нитью, смазанной GC Tooth Mousse.

2. Оставьте GC Tooth Mousse на поверхности зубов минимум на 3 минуты.

3. Затем языком распределите остатки GC Tooth Mousse по поверхности зубов и тканям полости рта. Постарайтесь как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплёвывать и не сглатывать слюну. Чем дольше GC Tooth Mousse и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

4. Тщательно сплюньте слюну и остатки препарата и по возможности не споласкивайте рот. Незначительные возможные остатки GC Tooth Mousse быстро растворятся. Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после процедуры нанесения крема.

ВКУСОВЫЕ ОТТЕНКИ: Клубника (S), Дыня (M), Ваниль (V), Мята (I), Фруктовый (T).

Примечание: S, M, V, I и T в скобках являются буквенными обозначениями вкусовых оттенков. Эти обозначения отпечатаны на тубах за номером партии для указания вкусового оттенка содержимого. Например, 021003S.....Клубника

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном сухом темном месте с пониженной влажностью при температуре 8-25°C (46.4-77.0°F).

(Срок годности: 2 года от указанной даты производства).

УПАКОВКИ: В одной тубе содержится 40 г (35 мл)

1. Набор в ассортименте: 10 x 40 г (по 2 тубы каждого вкусового оттенка – Клубника, Дыня, Ваниль, Мята, Фруктовый)

2. Набор одного вкусового оттенка: 10 x 40 г каждого вкусового оттенка: Ваниль, Клубника, Мята.

3. Отдельные тубы: 1 x 40 г туба любого вкусового оттенка

ПРИМЕЧАНИЕ: GC Tooth Mousse, содержащий уникальный комплекс CPP-ACP, был разработан в The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.

\*RECALDENT является лицензированной торговой маркой. Технология CPP-ACP имеет родственные патенты или заявки на патенты в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Канаде и США.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. После использования всегда плотно закрывайте крышку тубы, предварительно удалив остатки пасты или излишки влаги с горлышка тубы и изнутри крышки.

2. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

3. При попадании на одежду смойте препарат водой.

4. Если возникли симптомы ангионевротического отека, это может указывать на чувствительность, либо аллергию на бензоатные консерванты или какой-либо другой компонент препарата, например, вкусовые добавки. В таком случае необходимо прекратить использование препарата и обратиться к врачу соответствующей специализации.