

КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



класс V пришеечная эрозия



подберите цвет (оттенки Vita)



очистите, подготовьте полость



нанесите Дентин Кондиционер (20 сек) или Кавити Кондиционер (10 сек)



промойте водой



осушите воздухом (без переосушения)



отмерьте порошок (вариант - капсула)



замешайте порошок и жидкость в течении 20-25 сек



внесите **ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ** новая формула (рабочее время 3 мин 45 сек)



отвердите светом в течении 20 сек



финируйте с водой сразу после светоотверждения



отполируйте пломбу



нанесите Джи Си Коут Л Си



осветите в течении 10 сек



конечный результат

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

GC Fuji II LC IMPROVED	
Рабочее время	3 мин 45 сек
Время затвердевания, свет	20
Прочность на сжатие	242 МПа
Прочность на разрыв	37 МПа
Прочность на изгиб	69 МПа
Адгезия к эмали	11,3 МПа
Адгезия к дентину	8,2 МПа
Растворимость в воде	0,07%
Растворимость в молочной кислоте	0,24%
Рентгеноконтрастность	да

УПАКОВКА

- 3-2
Порошок 3 x 15 г, цвета А2, А3, В3
Жидкость 2 x 6,8 мл
- Отдельно
Порошок 15 г, цвета А1, А2, А3, А3,5, А4, В2, В3, В4, С2, С4, D2
Жидкость 6,8 мл
- 50 капсул
- Джи Си Кавити Кондиционер
5,7 мл жидкости
- Джи Си пистолет для капсул



GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax + 32.16.40.02.14
E-mail: info@gceurope.com
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.
East European Office
Čazmanska 8
10000 Zagreb, Croatia
Tel. +385.1.46.77.251
Tel. + 385.1.46.78.474
Fax. + 385.1.46.78.473
E-mail:
info@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

РОССИЯ
КРАФТВЭЙ Корпорэйшн ПЛС
129626 г. Москва,
3-я Мытищенская ул., д. 16
Тел./095/232-69-33,
287-67-67, 956-65-92
Факс /095/956-49-81
E-mail: alexevs@aha.ru

z O L F RU 2 60 - 02/01 (rus)

GC
FIRST IS QUALITY

ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ НОВАЯ ФОРМУЛА СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ



ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ

Разработка **ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ**, одного из первых светоотверждаемых стеклоиномеров, ввела в стоматологическую практику новый материал с выдающимися свойствами.

ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ новая формула это логическое развитие этого материала с существенными улучшениями его физических свойств.

Комбинация свойств стеклоиномера с выдающимся удобством в работе делают **ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ** новой формулой идеальным выбором для многих клинических случаев, таких как:

- невозможность осушения рабочего поля
- границы полости находятся в дентине
- эмалевые призмы не могут быть должным образом протравлены (молочные зубы)

ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ новая формула показывает, что впервые светоактивируемый стеклоиномерный цемент может быть использован как альтернатива обычным пломбирочным материалам для широкого спектра показаний в практической стоматологии.


ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ

НОВАЯ ФОРМУЛА

УЛУЧШЕНИЯ, ВИДИМЫЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Главной целью создания **ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ** новая формула было достижение еще более высоких эстетических качеств.

Это было достигнуто путем существенного уменьшения размеров используемых частиц.

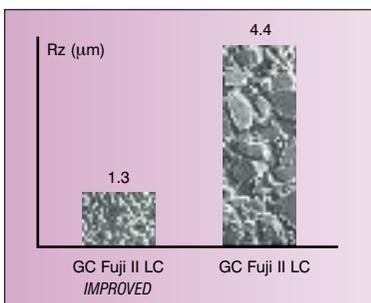

Гладкая поверхность пломбы, в результате уменьшения шероховатости

Результат новой разработки - это не только более гладкая поверхность, позволяющая добиться точного подбора цвета с соседними зубами и натурального отражения, но и эффективная защита от развития бактериальной пленки.

Кроме того, уменьшение размера частиц стекла увеличивает его содержание в материале, тем самым улучшая устойчивость к истиранию и увеличивая срок службы пломбы.

Практикующий врач по достоинству оценит преимущества новой формулы **ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ**, разработанной с учетом пожеланий и рекомендаций ведущих клиницистов мира. Благодаря повышенному содержанию стеклянного наполнителя, материал не прилипает к инструменту, вся процедура проводится с помощью одного инструмента.

ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ НОВАЯ ФОРМУЛА - ПОКАЗАНИЯ



Джи Си Дентин Кондиционер или Джи Си Кавити Кондиционер удалит загрязненный слой для создания оптимальной адгезии




класс III



класс V



класс I/II молочные зубы

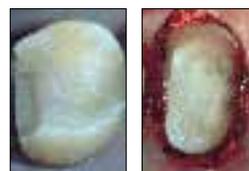

база

подкладка



высокая рентгеноконтрастность



Фото со сканирующего электронного микроскопа (x5000). Граница **Джи Си Фуджи II Л Си** новая формула и дентина

Комбинация свойств композитов и стеклоиономеров давно признана идеальным сочетанием требований, предъявляемых стоматологической практикой к реставрационным материалам.

Технические преимущества стеклоиономерных материалов означают, что **ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ** новая формула - это идеальный выбор для многих клинических случаев, например:

- Легкость в работе и хорошая адгезия к зубным структурам без проведения долгих протравочных и бондинговых процедур.
- Эстетичная, устойчивая к абразивному износу и кислотам пломба.
- Эффективная защита против вторичного кариеса с помощью высокого, пролонгированного фторовыделения.
- Исключительная биосовместимость

С помощью Дентин Кондиционера или Кавити Кондиционера существенно улучшается интеграция реставрации с дентином и эмалью.

Остаточный загрязненный слой удаляется с помощью Дентин Кондиционера или Кавити Кондиционера в течении десяти секунд. Голубая окраска с легкостью позволяет контролировать процедуру применения кондиционера.

Развитие микропротечек и изменения цвета на границе зуб - пломба, так хорошо знакомые при применении композитов, практически не встречаются при использовании **ДЖИ СИ ФУДЖИ II Л СИ** новая формула.

Материал рентгеноконтрастен, что облегчает последующее диагностирование.