

GC Tri Plaque ID Gel™

ДЖИ СИ Три Плак АйДи Гель™™

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СКОПЛЕНИЯ
ЗУБНОГО НАЛЕТА

Материал предназначен только для профессионального
применения в соответствии с показаниями, описанными в
настоящей инструкции.

ОПИСАНИЕ

GC Tri Plaque ID Gel окрашивает зубной налет в различные цвета,
помогая различать свежий налет, застарелый налет (отложившийся
более 48 часов назад) и налет, производящий большое количество
кислоты; это помогает в обучении пациента правильной гигиене
полости рта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать препарат у пациентов с повышенной
чувствительностью или аллергией на бензоатные консерванты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Нанесите гель GC Tri Plaque ID Gel на поверхность зубов с
помощью подходящего инструмента (микроаппликатор, тампон,
зубная щетка). Если гель наносится на несколько поверхностей,
выдавите его на пластиковую паллету. Затем попросите пациента
аккуратно прополоскать рот водой. Определите возраст и тип
налета по цвету окрасившегося геля.

- a) Розовый или красный цвет указывает на области скопления
свежего налета.
- b) Синий или фиолетовый цвет указывает на области скопления
застарелого налета, возраст которого не менее 48 часов.
- c) Светло-голубой цвет указывает на застарелый налет с высокой
степенью производства кислоты.

Примечание:

Удалите излишки геля с носика тубика, протерев его губкой или
ватным тампоном. Сразу же закрывайте тубик крышкой.

2. Объясните пациенту, как следует правильно чистить зубы; в
процессе объяснения следует удалить остатки геля и зубной
налета.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном сухом месте с пониженной влажностью и
вдали от прямых солнечных лучей (8-25°C).

Срок годности: 3 года от даты производства.

УПАКОВКА

Тубик, объем материала 40 г (36 мл)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Избегайте попадания материала в глаза. В случае попадания в
глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
- 2. Избегайте попадания материала на кожу, одежду и оборудование.
В случае контакта сразу же промойте водой место, куда попал
материал.
- 3. Избегайте попадания материала в полости в зубах. В случае
попадания немедленно промойте водой место, куда попал
материал. Если область окрасилась, оттенок исчезнет со
временем.
- 4. Материал содержит красные и синие красители, которые могут
окрасить стоматологические реставрационные материалы.
- 5. Не глотать материал.
- 6. Не смешивать материал с другими продуктами.
- 7. Держать материал вне зоны досягаемости детей.
- 8. Если пациент демонстрирует симптомы ангионевротического
аллергического отека, это может указывать на чувствительность
или аллергию на бензоатные консерванты. В этом случае следует
немедленно прекратить использование препарата и обратиться к
врачу соответствующей специализации.

Последняя редакция : 02/2011