

Unifast LC

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ ПЛАСТМАССА СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК, МОСТОВ И ВКЛАДОВ

Для использования только профессиональными стоматологами соответственно показаниям.

ПОКАЗАНИЯ

- Прямая техника с использованием врачебного полимеризатора (длина волны 470 нм).
 - Непрямая техника с использованием настольного технического полимеризатора (длина волны 470 нм).
 - Техника полимеризации под давлением и/или нанесения кистью.
1. Изготовление временных коронок, мостов, вкладок и накладок.
 2. Фиксация положения металлических коронок перед пайкой.
 3. Починка съемных протезов.
 4. Изготовление индивидуальных оттисковых ложек.
 5. Изготовление ортодонтических пластинок.
 6. Регистрация прикуса, шинирование, перебазировка протезов, изготовление кап и пр.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях у некоторых лиц продукт может вызвать чувствительность. В этом случае

прекратите использование продукта и обратитесь к врачу соответствующей специализации.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

а) Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет 1.0 г / 0.5 мл. Оно получается, если в мерник насыпать порошка до уровня первого деления и взять 21 каплю жидкости.

б) Добавьте порошок к жидкости в чашке для замешивания и быстро замешайте в течение 10 - 15 секунд. Рисунок иллюстрирует стадии полимеризации.

в) Используйте материал в сметанообразной или тестообразной фазе согласно способу применения, используйте стандартную технику.

г) Когда сделаны все необходимые коррективы и подгонка, засветите пластмассу, используя подходящий полимеризатор (длина волны 470 нм).

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Степень полимеризации и глубина просвечивания зависят от используемого полимеризатора и от оттенка пластмассы.

	Глубина просвечивания, мм			
	Translucent	Ivory	Pink # 3 / E	Live Pink # 8
Врачебный полимеризатор: 20 секунд 60 секунд	6 – 9 13 - 16	3 – 4 5 - 6	2 - 3 3 - 4	3 - 4 5 - 4
Технический полимеризатор: 1 минута 10 минут	10 > 25	3 16	2 16	5 24

Данные значения являются типичными и приведены для ориентировки.

2. Проведите светоотверждение пластмассы не позднее, чем через час после замешивания.
3. GC UNIFAST LC также можно полностью отвердить в течение 5 минут в воде при температуре 60 °C.
4. Не используйте порошок или жидкость с компонентами других акриловых пластмасс.

ХРАНЕНИЕ

Храните в прохладном тесном месте, недосягаемом для прямого солнечного света.

(Срок годности: 3 года)

УПАКОВКА

1. Баночка порошка 50 г.
2. Коробочка 30 г жидкости 2 x 15 г (2 x 14.7 мл).
3. Упаковка 1 2: 1 x 50 г порошка, 2 x 15 г (14.7 мл) жидкости, аксессуары.

ОТТЕНКИ

1. Коронковые цвета Слоновая кость, A2, A3, B2, B3, C2
2. Десневые цвета Розовый # 3, Светло розовый # 8 (с прожилками), Розовый E (Европа)
2. Прозрачный

ВНИМАНИЕ

1. Жидкость является летучим и огнеопасным веществом. Закрывайте бутылочку немедленно после использования и держите ее вдалеке от источников пламени.
2. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Начало замешивания

Время (мин)

23 °C

