



Увидеть - значит поверить!



Уникальный гель для
выявления зубного
налёта в трёх оттенках
- различает свежий,
застарелый и кислото-
продуцирующий налёт.

Tri Plaque ID Gel
от GC.



Часть концепции Минимальной
Интервенции компании GC.

GC



Для того чтобы во ЧТО-ТО поверить, людям, как правило, нужно это УВИДЕТЬ

Гель GC Tri Plaque ID Gel позволяет **не только различить застарелый и свежий зубной налёт**, производя несколько простых действий; этот уникальный гель также **точно демонстрирует области, где бактерии наиболее активны**, выявляя кислотный pH. Эта дополнительная информация значительно поможет Вам в повседневной практике для мотивации пациентов с целью улучшения их навыков гигиены полости рта.

Tri Plaque ID Gel = Синий пигмент Красный пигмент Сахароза

Кислоты Бактерии




СВЕЖИЙ ЗУБНОЙ НАЛЁТ

Когда биоплёнка зубного налёта тонкая, синий пигмент легко смывается, а красный остаётся, благодаря чему налёт окрашивается в красный/розовый цвет.




ЗАСТАРЕЛЫЙ ЗУБНОЙ НАЛЁТ (> 48 ч)

Когда биоплёнка зубного налёта остаётся на месте долгое время, её структура уплотняется, благодаря чему на ней задерживается и синий, и красный пигмент, и налёт окрашивается в синий/фиолетовый цвет.

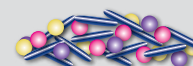

ЗУБНОЙ НАЛЁТ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛОТ

В областях, где зубной налёт обладает повышенным уровнем образования кислот, сахара, входящая в состав геля GC Tri Plaque ID Gel, метаболизируется кислотопродуцирующими бактериями. Произведённая ими кислота понижает pH зубного налёта (< pH 4,5), благодаря чему красный пигмент вымывается, и налёт приобретает светло-голубой оттенок.

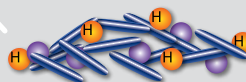

ЗУБНОЙ НАЛЁТ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛОТ

Dr. G. Ghani, Великобритания

Три оттенка, три лёгких этапа для эффективной мотивации пациента

1 Нанесите гель губкой, микроаппликатором или ватным тампоном.

2 Аккуратно промойте обработанную область, используя водяное орошение и слюноотсос. Зубной налёт выявляется в трёх оттенках:

- синий/фиолетовый - застарелый зубной налёт (более 48 часов)
- красный/розовый - свежий зубной налёт
- светло-голубой - зубной налёт с высоким уровнем кислотопродуцирования

Упаковки

004273 Тюбик 40 г (36 мл)



3 Чтобы удалить остатки геля после диагностики, просто почистите зубы щёткой с выявляющим гелем

В рамках профилактической стоматологии Вам и Вашим пациентам необходимо как можно больше инструментов работы для достижения оптимальных результатов по поддержанию здоровья полости рта. Гель GC Tri Plaque ID Gel может стать бесценным подспорьем в Вашей повседневной диагностической работе.

Официальный импортер и дистрибьютор продукции компании ДЖИ СИ в России:
ООО Крафтвэй Медикал
129626, Москва
3-я Мытищинская ул. 16
Тел. /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс. /495/ 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru
www.kraftwaydental.ru

GC

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Russia
129626 г. Москва
Кулаков переулок, д. 13,
офис 316
Тел. /926/ 007-21-31
russia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

z O LF RU 12 22 01/12