

ОПИСАНИЕ: GC MI Paste Plus – это крем на водной основе, содержащий RECALDENT™ с добавлением фторида (CPP-ACPF: Казеин Фосфопептид - Аморфный Кальций Фосфат Фторид). Уровень содержания фторида составляет 0,2% (900ppm), что приблизительно соответствует его концентрации в зубных пастах для взрослых пациентов. В полости рта молекулы CPP-ACPF связываются с биопленкой, зубным налетом, кристаллами гидроксиапатита эмали зубов и оседают на мягких тканях, локализуя биодоступные кальций, фосфат и фторид.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слюноотделение усиливает эффективность действия CPP-ACPF, а вкусовые добавки, в свою очередь, усиливают слюноотделение. Чем дольше комплекс CPP-ACPF и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

Стоматологический крем, содержащий биодоступные кальций, фосфат и фторид

1. Обеспечивает дополнительную защиту зубов.

2. Помогает нейтрализовать излишнюю кислотность, вызванную деятельностью кислотопродуцирующих бактерий зубного налета.

3. Помогает нейтрализовать излишнюю кислотность, вызванную воздействием иных внутренних и внешних источников кислотности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Казеин фосфопептиды вырабатываются из протеинов молока.

Не применять препарат у пациентов с доказанной либо подозреваемой аллергией на белки молока и/или с повышенной чувствительностью или аллергией на бензоатные консерванты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ

a. После процедур отбеливания, проводимых в клинике.

b. После процедур ультразвука, кюретажа.

c. После профессиональной очистки зубов.

d. Предотвращение и нейтрализация гиперчувствительности.

e. В качестве альтернативного метода местного нанесения фторида у детей от 6 лет и старше.

f. Во время ортодонтического лечения.

g. Профилактика у пациентов с высоким уровнем риска развития кариеса.

h. Для местного облегчения симптомов у пациентов, страдающих от эрозии, ксеростомии или синдрома Sjögren.

i. Для взрослых пациентов со специфическими диагнозами.

Нанесение в клинических условиях:

I. Нанесение с помощью индивидуальной каппы.

1. Тщательно промойте каппу под струей воды перед использованием.

2. Выдавите в каппу толстый слой GC MI Paste Plus и установите каппу на верхний и/или нижний ряд зубов.

3. Оставьте каппу зафиксированной в полости рта минимум на 3 минуты.

4. Удалите каппу.

5. Попросите пациента языком распределить остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Затем попросите пациента постараться как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не глатывать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

6. Попросите пациента как можно тщательнее сплюнуть слюну и остатки препарата и по возможности не споласкивать рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Предупредите пациента, что ему не следует пить и есть в течение 30 минут после окончания лечебного сеанса.

7. Если в каппе осталось какое-то количество GC MI Paste Plus, ее следует тщательно промыть водой сразу после использования.

II. Нанесение без применения каппы:

1. Если это необходимо, удалите излишки слюны с поверхности зубов с помощью ватного тампона.

Однако НЕТ необходимости просушивать поверхность зубов струей воздуха.

2. Нанесите GC MI Paste Plus на поверхность зубов с помощью ватного тампона или пальцем в перчатке, а в труднодоступных интерпроксимальных областях воспользуйтесь специальной щеткой.

3. Оставьте GC MI Paste Plus на поверхности зубов минимум на 3 минуты.

4. Попросите пациента языком распределить остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Затем попросите пациента постараться как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не глатывать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

5. Попросите пациента как можно тщательнее сплюнуть слюну и

остатки препарата и по возможности не споласкивать рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Предупредите пациента, что ему не следует пить и есть в течение 30 минут после окончания лечебного сеанса.

Нанесение в домашних условиях:

III. Нанесение в дневное время после чистки зубов в соответствии с рекомендацией стоматолога.

1. Нанесите достаточное количество GC MI Paste Plus на нижние и верхние зубы. Шарик препарата размером с крупную горошину – это необходимый минимум для каждого зубного ряда. Препарат наносится на поверхность зубов с помощью ватного тампона или сухим чистым пальцем. В труднодоступных местах пользуйтесь специальной щеткой или зубной нитью, смазанной GC MI Paste Plus.

2. Оставьте GC MI Paste Plus на поверхности зубов минимум на 3 минуты.

4. Затем языком распределите остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Постарайтесь как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не глатывать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

5. Тщательно сплюньте слюну и остатки препарата и по возможности не споласкивайте рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после процедуры нанесения крема.

IV. Нанесение в ночное время после чистки зубов в соответствии с рекомендацией стоматолога.

Примечание: Использование препарата на ночь особенно рекомендуется взрослым пациентам с высоким риском развития кариеса, и не рекомендуется детям до 12 лет.

1. Нанесите достаточное количество GC MI Paste Plus на нижние и верхние зубы. Шарик препарата размером с крупную горошину – это необходимый минимум для каждого зубного ряда. Препарат наносится на поверхность зубов с помощью ватного тампона или сухим чистым пальцем.

В труднодоступных местах (между зубами) пользуйтесь специальной щеткой или зубной нитью, смазанной GC MI Paste Plus.

2. Оставьте GC MI Paste Plus на поверхности зубов минимум на 3 минуты.

3. Затем языком распределите остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Постарайтесь как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не глатывать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

4. Тщательно сплюньте слюну и остатки препарата и по возможности не споласкивайте рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после процедуры нанесения крема.

ВКУСОВЫЕ ОТТЕНКИ: Клубника (S), Дыня (M), Ваниль (V), Мята (I), Фруктовый (T).

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном сухом темном месте с пониженной влажностью при температуре 8-25°C (46,4-77,0°F).

(Срок годности: 2 года от указанной даты производства).

УПАКОВКИ: В одной тубе содержится 40 г (35 мл)

1. Набор в ассортименте: 10 x 40 г (по 2 тубы каждого вкусового оттенка – Клубника, Дыня, Ваниль, Мята, Фруктовый)

3. Отдельные тубы: 1 x 40 г туба любого вкусового оттенка

ПРИМЕЧАНИЕ: GC MI Paste Plus, содержащий уникальный комплекс CPP-ACP, был разработан в The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.

*RECALDENT является лицензированной торговой маркой. Технология CPP-ACP имеет родственные патенты или заявки на патенты в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Канаде и США.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. После использования всегда плотно закрывайте крышку тубы, предварительно удалив остатки пасты или излишки влаги с горлышка тубы и изнутри крышки.

2. GC MI Paste Plus не рекомендуется применять у пациентов моложе 6 лет.

3. Применение в домашних условиях на ночь не рекомендовано для детей моложе 12 лет.

4. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

5. При попадании на одежду смойте препарат водой.

6. Если возникли симптомы ангионевротического отека, это может указывать на чувствительность либо аллергию на бензоатные консерванты или какой-либо другой компонент препарата, например, вкусовые добавки. В таком случае необходимо прекратить использование препарата и обратиться к врачу соответствующей специализации.